

NL



Gebruikers Handleiding Caddy³



Versie 01.04

Nederlands

©2015 Special Mobility bv

Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Special Mobility *bv*.

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen bekende constructies. Special Mobility *bv* voert een beleid van continu product verbetering, wijzigingen zijn daarom voorbehouden. De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering.

Special Mobility *bv* kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product. De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Special Mobility *bv* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan.

Special Mobility bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd.

De door Special Mobility *bv* gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen krachtens de wetgeving betreffende bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd.

Algemene introductie

Alvorens u gebruik gaat maken van de Caddy³ dient u, eerst deze handleiding aandachtig door te lezen. U dient kennis te nemen van alle mogelijkheden en beperkingen van uw Caddy³.

Geachte gebruiker,

De Caddy³ is een kwaliteitsproduct van Special Mobility. De producten van Special Mobility hebben zich over de jaren ongetwijfeld bewezen. U heeft gekozen voor een hoogwaardig product. Deze gebruiksaanwijzing maakt U met uw Transportmiddel vertrouwd. Leest U de gebruiksaanwijzing volledig door voor U het Transportmiddel in gebruik neemt.

Onder andere wordt hier het basisframe en accessoires en de bediening beschreven en enkele opmerkingen om ter harte te nemen. De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn algemene aanwijzingen die gezien moeten worden als globale richtlijnen.

U vindt in deze handleiding tevens een uitgebreide beschrijving van alle mogelijkheden van uw Caddy³. Reparaties vereisen de kennis van een deskundige. Wij adviseren u dan ook om reparaties en onderhoud door een deskundige te laten uitvoeren.

Vul hieronder de gegevens van uw geautoriseerde dealer in:

Bedrijfsnaam:

Adres:

.....

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Emailadres:

Website:

Inhoudsopgave:

	Pagina
1 Algemene Beschrijving	
1.1 Opbouw en beschrijving	1
1.2 Hoofdcomponenten Caddy ³	2
1.3 Hoofdcomponenten Caddy ³ zelfrijder	3
1.4 Accessoires	4
1.5 Aanduidingen op de Caddy ³	5
1.6 Service en technische ondersteuning	5
1.7 Goedkeuring	6
1.8 CE verklaring	6
1.9 Verklaring van overeenkomst	6
1.10 Gebruikte rolstoelen en het milieu	7
2 Veiligheid	
2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften	7
2.2 Waarschuwingen voor veilig gebruik	7
3 Gebruiksaanwijzing	
3.1 Controle voor het gebruik	8
3.2 Aandachtspunten tijdens transport	8
3.3 Transfer	8-9
3.4 Veiligheid tijdens het transport	10
3.5 Het op en afrijden van stoepen en ongelijke oppervlakten	10
3.6 Hellingen	10
3.7 Overige waarschuwingen	11
3.8 Koppelen Caddy ³	11-12-13
3.9 Opleiding / Kwalificatie	13
4 Onderhoud	
4.1 De rolstoel reinigen	13
4.2 Onderhoudsinterval	13
5 Technische specificaties	15
6 Garantieverklaring	14-15
7 Aansprakelijkheidsbepalingen	16
8 Toepassing	16

1. ALGEMENE BESCHRIJVING VAN UW ROLSTOEL

1.1 Opbouw en beschrijving

De Caddy³ bestaat uit 2 basismodellen: Caddy³ en de Caddy³ zelfrijder. Beide modellen zijn voorzien van verschillende componenten en onderdelen die op onderstaande afbeelding zijn weergegeven. Het kan zijn dat uw Caddy³ is voorzien van opties en accessoires die niet zijn afgebeeld op de voorbeeldtekening. Deze komt u echter vanzelf tegen tijdens het bestuderen van deze handleiding. De Caddy³ is niet geschikt voor het vervoer van personen met een decubitus aandoening. De gebruikte materialen die in contact komen met de bedekte huid zijn niet curatief of preventief. De Caddy³ is bijzonder stabiel en robuust. Hierdoor is de Caddy³ geschikt voor intensief gebruik. De beweegbare onderdelen zijn niet afneembaar. De Caddy³ beschikt over een veiligheidsrem (remt als de remhendel wordt losgelaten). Het model Caddy³ zelfrijder is additioneel uitgerust met bandremmen.

De Caddy³ is ontworpen voor:

- Personen tot een gewicht van 150 kg.
- Kortstondig transport van personen (max 2 uur)
- Gebruik op vlakke en geplaveide ondergrond
- Indien voorzien van koppeling (accessoire) kunnen meerder Caddy's in een rij vervoerd worden.
- Indien voorzien van een koppeling (accessoire) kan de Caddy³ gekoppeld elektrisch aangedreven worden door een Caddy e-Move.

Special Mobility aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of letsel voortvloeiend uit een ander gebruik dan waarvoor de rolstoel is ontwikkeld en ontworpen.



U dient goed op de hoogte te zijn van deze handleiding voordat de Caddy³ in gebruik wordt genomen.

1.2 Hoofdcomponenten Caddy³



figuur 1

	Omschrijving		Omschrijving
1	Voorwielen	9	Rembeugel
2	Achterwielen	10	Kantel mechanisme
3	Zwenkvork	11	Onderframe
4	Zitting	12	Bovenframe
5	Rugleuning		
6	Voetenplank (opklapbaar)		
7	Arملهuning (opklapbaar)		
8	Duwbuis		


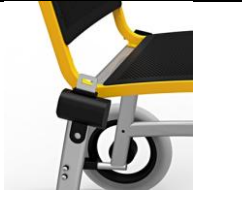











1.3 Hoofdcomponenten Caddy³ Zelfrijder



figuur 2

	Omschrijving		Omschrijving
1	Voorwielen	9	Rembeugel
2	Achterwielen	10	Kantel mechanisme
3	Zwenkvork	11	Onderframe
4	Zitting	12	Bovenframe
5	Rugleuning	13	Duwhoepel
6	Voetenplank (opklapbaar)	14	Jasbeschermer
7	ArMLEuning (opklapbaar)	15	Bandrem
8	Duwbuis		

1.4 Accessoires

	Anti Diefstal stang RVS		Gordel automaat dubbel
	Infuuspaal met haken RVS		Muntslot met houder RVS
	Gestoffeerde zitting en rugleuning		Krukhouder dubbel met beugel
	Tassenhaak		Sleutelslot, blokkeert de rem
	Klem om rem te laten vrijlopen RVS		Zuurstoffleshouder
	Kuitsteun (inklapbaar) in twee standen verstelbaar		Bagagerek RVS
	Koppeling met Caddy³ of Caddy e-Move (gepatenteerd)		


1.5 Aanduidingen op de Caddy³

Identificatiesticker op de Caddy³.

De Caddy³ Transportstoel is voorzien van een identificatie sticker.

De identificatie sticker bevindt zich op de achterzijde van de ontvangtbuis van de armleuningen. Hierop zijn te vinden de contactgegevens van de fabrikant en het serienummer van de Caddy³.

Onderstaand een voorbeeld van een identificatie sticker.

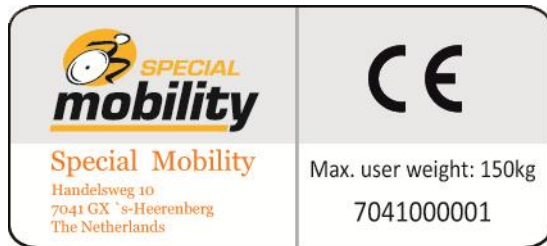

- **De aangebrachte aanduidingen, symbolen en instructies maken deel uit van de getroffen veiligheidsvoorzieningen. Ze mogen niet worden afgedekt of verwijderd. Ze moeten gedurende de levensduur van de Caddy³ op de transportstoel blijven zitten en duidelijk leesbaar zijn.**
- **Vervang of herstel onmiddellijk onleesbaar geworden of beschadigde aanduidingen, symbolen en instructies.**

⚠ U dient goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze handleiding voordat u de Caddy³ in gebruik neemt.

1.6 Service en technische ondersteuning

Neem contact op met uw dealer voor informatie betreffende specifieke afstellingen, onderhoud of reparatie. Vermeld dan altijd het type en het identificatienummer die op het identificatieplaatje staan.

Voor de dealer is een servicehandleiding beschikbaar

Neem contact op met uw dealer voor informatie betreffende specifiek onderhoud of reparatie. Indien de levering rechtstreeks door Special Mobility heeft plaatsgevonden neem dan contact op met:

Special Mobility
Handelsweg 10
4071 GX 's-Heerenberg
Nederland.
Tel: +31 314359490
E-mail: info@specialmobility.eu

Vermeld altijd het identificatienummer die op het identificatieplaatje van de Caddy³ staan.

1.7 Goedkeuring

Het product voldoet aan de volgende eisen:

- 1 EN 12183:2009 Met de hand bewogen rolstoelen- Eisen en beproevingsmethoden.
- 2 EN 12182 Hulpmiddelen voor mensen met functioneringsproblemen -algemene eisen en beproevingsmethoden.
- 3 EN ISO 14971:2012 Medische hulpmiddelen- Toepassing risicomanagement medische hulpmiddelen.

1.8 CE verklaring

Het product voldoet aan de bepalingen van de richtlijn voor Medische Hulpmiddelen en is aldus voorzien van CE markering.

1.9 Verklaring van overeenkomst



EG Verklaring van overeenstemming

Special Mobility is geregistreerd als fabrikant op het volgende adres:

Naam: Special Mobility (Handelsnaam)
Adres: Handelsweg 10
Postcode / Plaats: 7041 GX 's-Heerenberg

Wij, Special Mobility, verklaren geheel onder eigen verantwoording dat het product:

Productcategorie: Technisch hulpmiddel voor minder validen
Productgroep: Transport rolstoel voor niet permanent gebruik
Productnaam: Caddy3
Serienummer: SM70412000001 en opvolgend

Waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming is met de volgende normen:

- Europese Richtlijn Medische Hulpmiddelen (93/42/EEG) en het daarin gestelde onder artikel 14 (Registratie), e.e.a. als vastgelegd in Koninklijk besluit 243, artikel 5 (Notificatie).
- Europese normen NEN-EN 12182 en 12183. Deze hulpmiddelen zijn ingedeeld in Klasse 1. Hoewel de Caddy geen hulpmiddel Klasse 1 is, verklaart Special Mobility hierbij alle overeenkomstige maatregelen te hebben genomen als het ware een Klasse 1 product.

Nederland

's-Heerenberg d.d. 18-05-2015

F.J.G. Bod

Directeur

1.10 Gebruikte Caddy³ en het milieu

Indien uw Caddy³ overbodig is of aan vervanging toe is, kan deze meestal na overleg met de fabrikant worden teruggenomen. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer dan bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor hergebruik of milieuvriendelijke verwerking van de gebruikte materialen. Voor de productie van de rolstoel is gebruik gemaakt van diverse soorten kunststoffen en metalen.

2. VEILIGHEID


2.1 Algemene Veiligheidsvoorschriften

Special Mobility bv stelt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade veroorzaakt door het niet strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften, dan wel door onachtzaamheid tijdens het gebruik en schoonmaken van de Caddy³ en de eventuele bijbehorende accessoires.



De Caddy³ is indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, zeer betrouwbaar en stabiel.

Neem direct contact op met de fabrikant indien u bij het gebruik van de rolstoel een potentieel gevaar hebt geconstateerd.

- De gebruiker van de rolstoel is te allen tijde volledig verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en richtlijnen.
- Modificatie van de rolstoel is niet toegestaan.
- De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd.
-  **De Caddy e-Move mag alleen worden bediend door personen die hiervoor zijn opgeleid.**

2.2 Waarschuwingen voor veilig gebruik

- Gebruik de Caddy³ niet op straten of autowegen.
- Gebruik uw Caddy³ niet op zand, ruig terrein, natte en gladde oppervlaktes of oppervlaktes met weinig grip.
- Het onbemand vervoeren van uw rolstoel kan in alle voertuigen die speciaal aangepast en/of ontwikkeld zijn voor het vervoer van de Caddy³, op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
- De Caddy³ is niet te gebruiken als stoel in een motorvoertuig.
- Oppervlakte temperaturen kunnen oplopen wanneer Caddy³ wordt blootgesteld aan externe verhitting zoals zonlicht.
- Gebruik de Caddy³ nooit op trappen of roltrappen

3 GEBRUIKSIINSTRUCTIE

3.1 Controle voor het gebruik.

Voor het transport:

- Controleer de werking van de rem
- Check op afwijkingen zoals loszittende delen
- Check of de vrijloop klem niet geactiveerd is (accessoire).
- Indien er afwijkingen geconstateerd worden, zet de caddy³ apart , plak er een notitie op met de omschrijving van de afwijking en informeer uw leidinggevende.

3.2 Aandachtspunten tijdens transport

Tijdens de rit:

- Handen en armen van de te vervoeren persoon altijd binnen
- het bereik van de armsteunen houden.
- Voeten van de te vervoeren persoon altijd op de voetenplaat houden



Blijf tijdens de rit alert op ledematen die buiten de contouren van de Caddy³ uitsteken. Dit om beknellingen te voorkomen.

3.3 Transfer

Stap 1: De armlegger naar beneden geplaatst en de voetplaat omhoog.
Aanrijden met de zitting op geringe afstand van de knieholtes.



Stap 2: De rem dient geactiveerd te zijn. Vanuit stand naar zithouding. Het vasthouden van de armleggers zorgt voor zekere begeleiding naar de zithouding.



Stap 3: Als de zithouding is bereikt, voetenplank omlaag brengen en beide voeten naast elkaar op de voetenplank laten plaatsen voor zekere begeleiding naar de zithouding.



3.4 veiligheid tijdens transport

- Houd ruim afstand op personen die zich in de onmiddellijke nabijheid van de Caddy³ bevinden.
- Pas uw snelheid aan de omstandigheden aan.
- Zorg ervoor dat de te transporteren personen ledematen binnen de begrenzing van de Caddy³ houden.
- Handelingen als in- en uitstappen van de transportstoel altijd verrichten in het bijzijn van een deskundige assistent.

3.5 Het op- en afgaan van stoepen en ongelijke oppervlakten

De onderstaande methode is bedoeld voor als de rolstoel geduwd wordt door een begeleider en geeft de gebruiker een veilig gevoel.

Opgaan van de stoep/ongelijke oppervlakte

1. De begeleider dient de Caddy³ voorwaarts voor de stoep te plaatsen. Vervolgens dient de begeleider de duwbuis (figuur 1 en 2 no.8) naar zich toe te trekken en tegelijkertijd de voet te plaatsen op het kantelmechanisme (figuur 1 en 2 no.10).
2. Duw de Caddy³ op de stoep of verhoging tot de achterwielen de stoep raken, laat nu het kantelmechanisme los.
3. Til de Caddy³ vervolgens aan de duwbuis over de hindernis.

Afgaan van de stoep/ongelijke oppervlakte



1 Ga altijd achteruit de stoep af zodat de Caddy³ niet voorover kan hellen waardoor de gebruiker uit de rolstoel zou kunnen vallen.

2 Ga nooit zonder begeleider de stoep af.

3.6 Hellingen

Inspecteer de helling altijd op risico's zoals gaten of gladde en oneven oppervlaktes, voordat u erop of eraf gaat rijden. Wanneer u de helling niet kunt zien, vraag dan aan iemand om hem voor u te inspecteren.

Helling oprijden

- Rijd nooit een helling op met een hellingshoek van meer dan 8 graden.
- De Caddy³ is op een helling minder stabiel.
- De begeleider die de Caddy³ voortbeweegt, moet blijven duwen om te voorkomen dat de Caddy³ uit eigen beweging gaat rijden.
- Zet de Caddy³ op de rem (rembeugel loslaten) als er niet of onvoldoende wordt geduwd.

Helling afrijden

- De Caddy³ zal uit zichzelf de helling afrijden wanneer de rembeugel bediend wordt.
- Voorkom dat de rolstoel een te hoge snelheid haalt.
- De begeleider kan de rolstoel afremmen door de rembeugel los te laten.
- Bij stilstand op een helling kan de rembeugel licht naar voren gedrukt worden. Hierdoor ontstaat extra remkracht

Waarschuwing:



Rijd nooit met uw Caddy³ van een trap of roltrap af.

3.7 Overige waarschuwingen:



- Rijd voorzichtig op gladde wegen, als gevolg van regen, ijsvorming of sneeuw.
- Voorkom dat de rolstoel in contact komt met zeewater: zeewater is agressief en tast de rolstoel aan.
- Voorkom dat de rolstoel in contact komt met zand: zand kan doordringen tot in de draaiende delen van de rolstoel, waardoor onnodig snelle slijtage optreedt.
- Zet de rolstoel niet in direct zonlicht: de bekleding kan te warm worden waardoor verbranding of overgevoeligheid van de huid kan plaatsvinden.
- Als u onder invloed bent van middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, mag u niet met de rolstoel rijden.
- U dient voldoende gezichtsvermogen te hebben om in de betreffende gebruikssituatie veilig met de rolstoel te kunnen rijden.
- Pas op dat er geen kledingstukken loshangen. Deze zouden tussen de wielen kunnen komen.

3.8 Koppelen Caddy³ (accessoire)



Figuur 3

Indien de Caddy³ is uitgerust met koppelnokken (Figuur 3), kan de Caddy³ gekoppeld worden met een andere Caddy³ (hierop dient ook een koppeling gemonteerd te zijn). Deze nokken zijn bedoeld om een Caddy³ te koppelen. Gekoppeld kan er een rij met Caddy's vervoerd worden.

De Caddy³ kan ook gekoppeld worden met een elektrisch aangedreven Caddy e-Move. Zie hiervoor de Handleiding van de Caddy e-Move.


Het koppelen van een Caddy³:

Stap 1



Breng de koppelklem van de voorste Caddy³ tot vlak voor de koppelnok van de achterste Caddy³

Stap 2

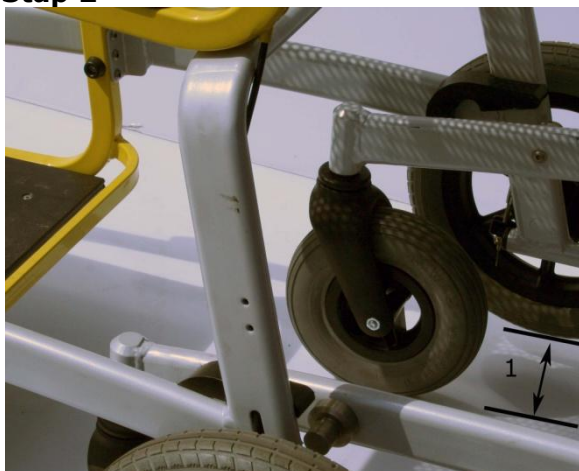

Til de voorste Caddy³ aan de achterzijde op en schuif de klem over de nok van de achterste Caddy³ totdat deze aan beide zijden vast zit. De achterwielen van de Caddy³ zijn nu los van de bodem.

Stap 3



De voorste Caddy³ en de achterste Caddy³ zijn nu aan elkaar gekoppeld.



Let op. Alleen een Caddy³ met speciale koppelklemmen kan gekoppeld worden. Special mobility aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien andere dan door Special Mobility geproduceerde koppelingen zijn aangebracht.

3.9 Opleiding / Kwalificatie

- De Caddy³ mag alleen bediend worden door personeel dat instructie heeft gehad. Special Mobility verzorgt een opleiding van personeel dat ander personeel opleidt.

4 Onderhoud

4.1 De rolstoel reinigen

- *Droog vuil afnemen*
Reinig de bekleding, metalen onderdelen en framedelen met een droge zachte doek.
- *Modder en ander nat vuil afnemen*
Reinig de vuile delen eerst met een natte spons. Wrijf de delen daarna droog met een droge zachte doek.

4.2 Onderhoudsinterval

- Het onderhoudsinterval is afhankelijk van de ingezette uren. Er zal per afnemer individueel worden bepaald wat de juiste frequentie voor onderhoud is.
- Elk half jaar dient er een inspectie te worden uitgevoerd.

5 Technische specificaties

Omschrijving	
Producent	Special Mobility bv
Productsoort	Transportstoel
Type	Caddy ³
Uitvoering	Caddy ³ en Caddy ³ zelfrijder
Type voorband	7 x 1¾ PU band
Type achterband Caddy³	12½ x 2¼ PU band
Type achtband Caddy³ zelfrijder	26 x 1 PU band
Zwenkvork	Gelagerd, Nylon versterkt met glasvezel (PA+GF+)
Maximale gebruikersgewicht	150 Kg
Totale breedte	700 mm
Totaal gewicht	25 Kg
Effectieve zitdiepte	380 mm
Effectieve zitbreedte	470 mm
Armsteunhoogte	260 mm
Voorzijde armsteun tot rugsteun	400 mm
Maximale hellingshoek	8%
Grondspeling Caddy³	110 mm
Grondspeling Caddy³ zelfrijder	105 mm
Remsysteem Caddy³ + Caddy³ zelfrijder	Trommelremmen / veiligheidssysteem
Additioneel remsysteem Caddy³ zelfrijder	Bandremmen
Plaats serienummer	Achterzijde op de ontvangtbuis van de armleggers

6 GARANTIE

Garantie bepaling:

In de garantie- en aansprakelijkheidsbepalingen hebben de navolgende begrippen de daarachter verwoorde betekenis:

- **Product:** de door Special Mobility gefabriceerde en geleverde Caddy³
- **Afnemer:** Hij die rechtstreeks van Special Mobility bv een product betreft.
- **Dealer:** Hij die een van Special Mobility betrokken product door levert aan derden.
- **Gebruiker:** hij die een door Special Mobility gefabriceerd product gebruikt.

Onverminderd hetgeen omtrent garanties wordt bepaald in de op het Product van toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt met betrekking tot die garanties in ieder geval het volgende:

1. Behoudens voor zover in de navolgende bepalingen anders staat aangegeven, staat Special Mobility jegens de Afnemer van het Product in voor de deugdelijkheid daarvan voor het doel waarvoor het Product is bestemd – één en ander als omschreven in deze handleiding – en voor de kwaliteit van het materiaal waaruit het Product is gemaakt en de wijze waarop het Product is gefabriceerd.

2. Reparatie of vervanging van onderdelen van het Product die nodig is als gevolg van gebreken die hun oorzaak vinden in kwalitatief gebrekkig materiaal of fabricagefouten wordt kosteloos uitgevoerd, mits die gebreken zijn ontstaan binnen één (1) jaar na de datum van levering van het Product aan de Afnemer. De te vervangen delen worden door Special Mobility vervangen.

Demontage of montage van deze delen komt voor rekening van Special Mobility. Niet voor kosteloze reparatie of vervanging als bedoeld in de vorige volzin komen derhalve in aanmerking:

- de reparatie of vervanging die nodig is in verband met gebreken die zijn ontstaan na één (1) jaar na de datum van levering van het Product aan de Afnemer;
- de reparatie of vervanging die nodig is in verband met gebreken die hun oorzaak vinden in een onjuist of onzorgvuldig gebruik van het Product of die hun oorzaak vinden in een gebruik van het Product voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd, in welk verband zal gelden dat indien de Afnemer een Dealer is, deze dealer Special Mobility zal vrijwaren tegen eventuele claims van Gebruikers of andere derden voor gebreken die hun oorzaak vinden in een onjuist of onzorgvuldig gebruik van het Product;
- onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, en de noodzaak tot reparatie of vervanging van die onderdelen het daadwerkelijke gevolg is van normale slijtage.

3. Onverminderd het bepaalde onder geldt voor wat betreft een elektrisch Product, dat ten aanzien van de accu die onderdeel vormt van het Product slechts een garantie wordt gegeven in geval van storingen of niet-functioneren van de accu die aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van materiaal- of fabricagefouten. Een storing of niet-functioneren van de accu als gevolg van normale slijtage valt niet onder de garantie als bedoeld in deze garantiebepalingen. Evenmin onder die garantie vallen storingen of niet-functioneren die het gevolg zijn van oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het Product of de daarvan deel uitmakende accu, daaronder begrepen het onjuist opladen van de accu en het verzuimen van het laten plegen van tijdig en goed onderhoud, in welk verband tevens geldt dat in geval de Afnemer een Dealer is, deze dealer Special Mobility zal vrijwaren tegen eventuele claims van Gebruikers of andere derden die hun oorzaak vinden in het hiervoor bedoelde oneigenlijk of ondeskundig gebruik van het Product of de daarvan deel uitmakende accu.

4. De garanties als verwoord in de voorafgaande bepalingen vervallen in ieder geval, indien:

- geen of onvoldoende uitvoering is gegeven aan de richtlijnen van Special Mobility voor het laten onderhouden van het Product
- een benodigde reparatie of vervanging van onderdelen hun oorzaak vindt in verwaarlozing, beschadiging of overbelasting van het Product of een gebruik van het Product voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd

7 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALINGEN

Onverminderd hetgeen omtrent aansprakelijkheid wordt bepaald in de op het Product van toepassing zijnde algemene voorwaarden, geldt met betrekking tot aansprakelijkheid in ieder geval het volgende:

1. Met inachtneming van de navolgende bepalingen, aanvaardt Special Mobility slechts aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel die het gevolg is van een gebrek van het Product waarvoor Special Mobility verantwoordelijk is en voor schade aan een andere zaak die in privé eigendom toebehoort aan het gebruiker van het Product, mits die schade het rechtstreekse gevolg is van een gebrek van het Product.
2. Special Mobility aanvaardt geen andere of verdere aansprakelijkheid dan verwoordt onder 1. In het bijzonder aanvaardt Special Mobility geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, in welke vorm dan ook.

8 TOEPASSING

De Caddy³ is geschikt om mensen over geplaveide ondergrond binnenshuis en beperkt buitenshuis te transporteren. De Caddy³ is in staat om over een aantal obstakels en hellingen heen te gaan, De Caddy³ kan worden gebuikt om 1 persoon met een maximaal gebruiksgewicht van niet meer dan 150 kg vervoeren. Daarnaast kan een Caddy³ gekoppeld worden. Deze Caddy³ is bedoeld als een middel voor Transport van mensen die onvoldoende kunnen lopen over langere afstanden. Het Transportmiddel is bedoeld voor tijdelijk gebruik . Er kan gekoppeld worden met een Caddy³ of een Caddy e-Move. De Caddy³ is onder normale milieu-omstandigheden te gebruiken.